



# JOYCEclinic FF

Single-Patient-Use-Maske



## JOYCEclinic FF Einfach kompromisslos.

Mit unserer Single-Patient-Use Full-Face-Maske für die akute nicht-invasive Beatmung erleben Sie gewohnt gute Qualität von Löwenstein Medical.

JOYCEclinic FF ermöglicht gleichzeitig eine schnelle, einfache Maskenanpassung sowie einen sicheren, komfortablen Maskensitz – und das sogar bei Drücken bis 50 hPa.

Die auch bei hohen Drücken stabil sitzende Kopfbänderung lässt sich im Notfall durch eine klar erkennbare Reißleine schnell und unkompliziert diskonnizieren.

Dank Single-Patient-Use werden Querkontaminationen vermieden. So müssen Sie auch in der Klinik trotz Kostendruck keine Kompromisse eingehen.

- Vermeidung von Querkontamination
- Druckstabiles Maskenkissen und Bänderung
- Reißleine

Mit Hilfe von 4 unterschiedlichen, austauschbaren Winkeladaptern finden Sie für jede Situation und Gerätekombination die passende Maskenvariante.

JOYCEclinic FF gibt es vorkonfektioniert in 3 Größen in den Varianten non-vented, non-vented mit AAV (Leckage 1) und vented mit AAV (Leckage 2). Die korrekte Größenbestimmung gelingt durch die Anpassschablone sicher und schnell – dank des Zwei-Kammer-Beutels sogar ohne die Maske zu berühren.

Der als praktisches Zubehör erhältliche Endoskopie-Adapter ermöglicht die Bronchoskopie, ohne die Beatmung unterbrechen zu müssen. Die Winkel NV, NV + AAV und Vented sind auch als leicht austauschbare Ersatzteile verfügbar.

Sämtliche Masken sind auch als Set aus 10 Masken ohne Zwei-Kammer-Beutel verfügbar. Dem Set wird eine Gebrauchsanweisung und Anpassschablone zugelegt.

- 3 Größen
- 4 wechselbare Winkel
- Anpassschablone
- Zwei-Kammer-Beutel
- Einzelmaske oder 10er-Set

## Winkeladapter

Dank eines Hebels am Sicherungsring ist ein einfaches Lösen und schnelles Wechseln der Winkel jederzeit möglich.



NV ohne AAV\*



NV mit AAV\* (Leakage 1)



V mit AAV\* (Leakage 2)



Endoskopieadapter

\*AAV = Anti-Asphyxia-Valve (Notatemventil)

## Drehgelenk-Adapter


Mit Hilfe des in allen Vented-Varianten integrierten Drehgelenk-Adapters kann auch ein CPAP-Schlauch genutzt werden.

Drehgelenk-Adapter




## Wann nutze ich welchen Winkel?


### NV-Winkel

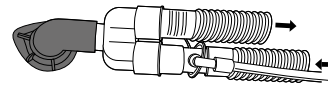

- Doppelschlauchsystem mit getrennter Inspiration und Expiration sowie geräte-seitigem Expirationsventil

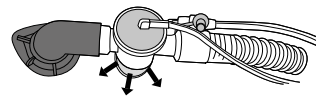


- Einschlauchsystem mit patientennahe Expirationsventil

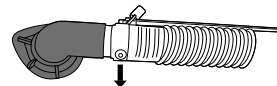

- Einschlauchsystem mit Ausatemleckage

### NV + AAV-Winkel

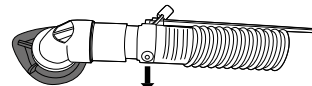


- Einschlauchsystem mit Ausatemleckage und zusätzlicher Sicherheit bei Geräteausfall (Anti-Asphyxie-Ventil)
- Standardkombination bei Beatmungsgeräten mit Leckagesystem



- Einschlauchsystem mit patientennahe Expirationsventil darf nicht verwendet werden.
- Der Flow ist nicht ausreichend hoch, um das Notfallausatemventil offen zu halten.

### Vented-Winkel

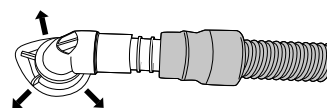

- Adapter und CPAP-Schlauch für die Verwendung von prisma VENT oder vergleichbaren Beatmungsgeräten

### Bestellinformation

Artikel, je Verpackungseinheit 1 Stück	Artikelnummer
JOYCEclinic FF NV • Größe S • Größe M • Größe L	WM 26805 WM 26815 WM 26825
JOYCEclinic FF NV + AAV (Leckage 1) • Größe S • Größe M • Größe L	WM 26845 WM 26855 WM 26865
JOYCEclinic FF vented (Leckage 2) • Size S • Size M • Size L	WM 26840 WM 26850 WM 26860
Artikel, je Verpackungseinheit 10 Stück	Artikelnummer
JOYCEclinic FF NV • Größe S • Größe M • Größe L	WM 26857 WM 26858 WM 26859
JOYCEclinic FF NV + AAV (Leckage 1) • Größe S • Größe M • Größe L	WM 26869 WM 26870 WM 26871
JOYCEclinic FF vented (Leckage 2) • Größe S • Größe M • Größe L	WM 26866 WM 26867 WM 26868

### Zubehör

Endoskopieadapter	WM 15864
-------------------	----------

### Ersatzteile

Winkel NV	WM 25269
Winkel NV + AAV	WM 26834
Winkel vented	WM 26833
Kopfbänderung JOYCEclinic FF (5 Stück)	WM 26835
Drehgelenk-Adapter	WM 26916

### Technische Daten

Produktklasse nach Richtlinie 93 / 42 / EWG	IIa
Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (weiblich)
Therapiedruckbereich	4 hPa - 50 hPa
Geometrischer Totraum • Größe S • Größe M • Größe L	225 ml 255 ml 305 ml

CE 0197



© Urheberrechtlich geschützt. Vertriebfähigkeit jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical Technology.

Löwenstein Medical Technology  
Kronsaalweg 40, 22525 Hamburg  
Deutschland  
T: +49 40 54702-0  
F: +49 40 54702-461